

Technik Directrices de tratamiento para la técnica FADING

Eliminación de tatuajes PMU, microblading y corporales

Asesoramiento

1. Explicación de la técnica SKINIAL FADING con ácido láctico

- a. Con una aguja, como en el caso del maquillaje permanente o los tatuajes, se introduce un ácido láctico débil en la capa de la piel que contiene el colorante, lo que provoca un rechazo parcial de los pigmentos de color sin que se produzca una herida abierta.
- b. El color sale del cuerpo de manera parcial, pero definitiva (reacción de rechazo natural del cuerpo).

2. Riesgos y efectos secundarios

- a. Enfermedades previas
- b. Bajo riesgo de reacción alérgica a la tinta del tatuaje.
- c. Riesgos de los rayos ultravioleta por la radiación solar
- d. Hasta la fecha no se conoce ningún riesgo de cicatrices.
- e. Riesgo de infección (por contaminación, p. ej., maquillaje excesivo, etc.), pero poco probable gracias al rápido cierre de los canales de punción.
- f. Puede aparecer enrojecimiento temporal, pero desaparece al cabo de poco tiempo => Favorece la cicatrización aguda con SKINIAL SCAR CARE CREAM.
- g. Hasta ahora no se han producido alteraciones pigmentarias.

3. Ventajas de la tecnología y OPORTUNIDADES

- a. Los colores no siempre resaltan al mismo tiempo, pero sí de manera clara.
- b.
 - i. El color se expulsa hacia el exterior.
 - ii. El ácido láctico se degrada de forma natural mediante el metabolismo.
 - iii. Explicación de posibles enrojecimientos leves y temporales
- c. Si es necesario, muestre al cliente imágenes del antes y el después o descárguelas del PORTAL DE SERVICIO.

4. Explicación del proceso

- a. Ventajas del tratamiento
 - Menor número de tratamientos (en comparación con el láser).
 - Riesgos mínimos en comparación con el láser (cicatrices por quemaduras, sustancias tóxicas (benceno, ácido cianhídrico, etc.), riesgo de cáncer a largo plazo, depósito del colorante en los riñones, el bazo y el sistema linfático).
 - Farbe verlässt langsam, aber sichtbar die Haut
 - El color se va desvaneciendo de la piel de manera lenta pero visible.
- b. ¿Por qué es necesaria una declaración de consentimiento?
¡Es obligatorio! Los tatuajes y su eliminación constituyen lesiones corporales.
- c. ¿Por qué un cuestionario médico?
Para su propia protección, para identificar los riesgos del tratamiento, ...
- d. Después, espere entre 4 y 6 semanas antes de realizar el siguiente tratamiento (esta es una recomendación aproximada, siempre depende de cada caso particular).

Tratamiento

1. Preparación

- a. Lugar de trabajo (15 minutos antes de que llegue el cliente)
 - i. Desinfecte bien la camilla y coloque una sábana limpia.
 - ii. Prepare todos los utensilios necesarios para el tratamiento y el cuidado posterior sobre la mesa de tratamiento y desinfectelos.
 - iii. Preparación para el tratamiento:
 1. Aparato de micropigmentación en buen estado de funcionamiento y conectado.
 2. Aguja estéril y aguja de repuesto a mano (3 unidades redondas).
 3. Tampones/cubetas a mano.
 4. Spray desinfectante para la piel y toallitas desinfectantes a mano.
 5. Botella de suero SKINIAL a mano
 6. 2 tapas de color a mano
 7. Soporte para tapas de color estable
 8. 1 par de guantes (si es necesario, guantes de repuesto a mano)
 - iv. Preparación para el cuidado posterior
 1. Hoja de cuidados posteriores
 2. Colocar al menos un frasco de SCAR CARE CREAM en un lugar visible.
- b. Chequeo médico
 1. Determinación del estado de salud actual del cliente.
 - a) Asegúrese de que el cliente se encuentre actualmente sano y no esté tomando medicamentos fuertes. El cliente tampoco debe estar bajo los efectos del alcohol ni haber consumido drogas. Explicación: si el sistema inmunológico está debilitado por una enfermedad o por el consumo de

drogas, no se podrá lograr el resultado deseado de la eliminación (sin rechazo). Además, el cliente no debe tomar medicamentos anticoagulantes (por ejemplo, aspirina) durante los tres días previos a la intervención, ya que el sangrado de la herida puede afectar al resultado.

- b) Pregunte al cliente si tiene problemas circulatorios o si le incomoda ver sangre o heridas abiertas.

c. El cliente toma asiento

El cliente toma asiento en la silla de tratamiento. Asegúrese de que el cliente adopte una postura cómoda y relajada, que sea adecuada tanto para él como para usted durante el tratamiento.

d. Lavado de la zona tratada

¿Está limpia la zona a tratar? Si no es así, limpie la superficie. A continuación, rocíe la zona 2 o 3 veces con el spray desinfectante para la piel MEDICLEAN, deje que actúe brevemente y límpiela con un hisopo.

e. Tomar una foto del “antes”

Antes de cada tratamiento, se debe tomar una foto de la zona a tratar en la que se vea bien el tatuaje (ajuste macro). Compruebe que la foto haya salido bien y sea lo suficientemente nítida.

f. Preparación del cliente

- i. El profesional se lava las manos con jabón y las desinfecta.
- ii. El profesional desinfecta y limpia el lugar de trabajo.
- iii. El profesional se pone guantes y los desinfecta.
- iv. Sacar la cánula desechable
- v. Se saca la aguja estéril del envase y se coloca en el mango del dispositivo de micropigmentación. Asegúrese de que la longitud de la aguja sea de aproximadamente 1,0-1,3 mm como máximo. Puede variar la longitud directamente en la pieza de mano girándola.
- vi. Agite bien el frasco de SKINIAL SERUM antes de abrirlo.
- vii. Llenar los tapones de color
- viii. Alinee varios tapones de color y fíjelos en el soporte para tapones de color. Desinfecte los tapones de color antes de llenarlos. En primer lugar, llene solo hasta la mitad una tapa de color con el SKINIAL SERUM correspondiente. Rellene durante el tratamiento.
- ix. Desinfecte la zona a tratar.
- x. Ajuste el dispositivo de micropigmentación a una frecuencia media, por ejemplo, 90-120, según el modelo. En zonas de piel sensible, ajuste a una frecuencia más baja.

2. Tratamiento

Antes de comenzar con el tratamiento, debe tener una idea de por dónde empezar y qué zona desea tratar.

Informe a su cliente de que va a comenzar con el tratamiento. Indíquelo que puede hacer una breve pausa en cualquier momento si así lo desea.

Procedimiento:

- a. Se enciende el dispositivo de eliminación.
- b. Se sujeta la zona tratada con el pulgar y el índice.
- c. La punta de la aguja del dispositivo de eliminación se sumerge en la tapa de color con el suero.
- d. A continuación, trate la zona o, por ejemplo, ambas cejas de izquierda a derecha y de arriba abajo. Mantenga el dispositivo de eliminación en posición vertical. Después de 5-10 pinchazos, sumerja de nuevo la aguja en el suero del dispositivo de eliminación.
- e. Cada zona puede tratarse dos veces por sesión. Trabaje con cuidado y aplique muchos puntos en una superficie pequeña (hasta 50 por cm² sin dejar espacio), ya que cuantos más puntos, más tinta repele la piel.
- f. Cuando las zonas estén suficientemente tratadas, el tratamiento habrá finalizado y podrá volver a rociar MEDICLEAN sobre las zonas tratadas sin limpiarlas. A continuación, se debe tomar una foto final.

3. Cuidado de heridas

Si la clienta lo desea, cubra la zona tratada con un paño transpirable y fíjelo en las esquinas con cinta adhesiva. Esto protegerá la herida hasta que se seque, lo que debería ocurrir en pocos minutos. Si entra suciedad en la herida abierta, existe riesgo de inflamación, por lo que es muy importante el tratamiento posterior con **MEDICLEAN**. ¡Atención, proteja la zona tratada de la suciedad y la radiación UV!

Cuidado posterior

Además de la predisposición genética, el cuidado posterior inadecuado es la causa más común de la formación de cicatrices. Por este motivo, consideramos que el cuidado posterior es uno de los tres elementos centrales del método SKINIAL.

1. Explicación del cuidado posterior al tratamiento

- a. Después del tratamiento, se debe entregar al cliente la «información para el cliente». En ella se describe nuestro tratamiento y se ofrece información oficial sobre el principio activo, así como sobre los riesgos y efectos secundarios. Junto con

la información que ya se ha proporcionado durante la consulta, esta entrega de información también tiene relevancia legal, ya que ningún cliente puede alegar que no ha sido informado de manera detallada y completa.

- b. Lo mejor es explicar al cliente que en la primera página encontrará información resumida por escrito sobre el concepto. Sin embargo, la página siguiente siempre debe explicarse de manera concreta.

Instrucciones de cuidado:

- I. Mantenga limpia y seca la zona tratada.
- II. Nuestro tratamiento, que es prácticamente estéril, no provoca inflamaciones. Estas se producen por bacterias de la suciedad y, en consecuencia, por infecciones debidas a la falta de limpieza e higiene.
- III. Proteja la zona tratada de la fricción. La zona tratada se cura más rápidamente al aire libre.

2. Qué hacer en caso de complicaciones

- a. Mantenga la calma. Hable en un tono moderado y tranquilice al cliente.
- b. Si se trata de una situación de peligro grave, pregunte al cliente por todos los síntomas, cuándo aparecieron y qué hizo exactamente. En caso de peligro grave, el cliente debe ser trasladado al hospital.
- c. Anote todo con mucho detalle, ya que estas notas podrían serle útiles más adelante.
- d. Los médicos podrían preguntarle por el tipo de tratamiento. Remítalos a nosotros, disponemos de fichas de datos de seguridad para todos los líquidos removedores y la SCAR CARE CREAM, que puede enviar a los médicos o clínicas para que puedan iniciar los posibles tratamientos.
- e. Antes de dar consejos médicos a los clientes, recuerde que usted solo realiza un tratamiento cosmético y no da consejos terapéuticos. Solo los médicos están autorizados a hacerlo. En ese caso, póngase en contacto con SKINIAL.
- f. Si los clientes intentan presionarlo mucho porque no están satisfechos con un tratamiento, póngase en contacto con SKINIAL con toda la información y las fotos. La evaluación médica mediante diagnóstico a distancia suele hacer entrar en razón a los clientes.

3. Concertación de citas y despedida

Concierte con su cliente una cita para el próximo tratamiento en unas 4-6 semanas.

4. Entsorgung

Todos los paños, vendas de gasa, hisopos, guantes, etc. utilizados para el tratamiento deben desecharse como residuos especiales. La(s) aguja(s) debe(n) desecharse en un recipiente separado resistente a los pinchazos. El dispositivo de micropigmentación y el lugar de trabajo deben desinfectarse nuevamente.